


**INSTRUCTIE SOA-ONDERZOEK –
BLOED**

1

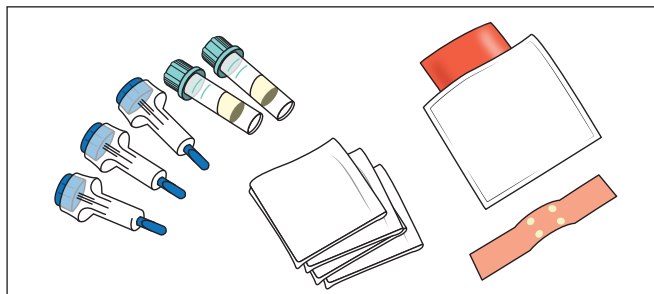


In de verpakking zit:

- twee ontsmettingsdoekjes
- drie vingerprikkers
- twee opvangbuisjes
- schoonmaakdoekjes
- een pleister


Het is niet verstandig het doosje op vrijdag, zaterdag of zondag in de brievenbus te doen; het materiaal is dan te lang onderweg. Neem het materiaal liever na het weekend af en stuur het daarna direct op.

2

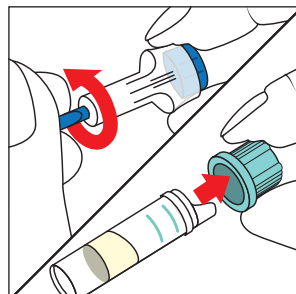


Pak een vingerprikker en draai de blauwe punt eraf. Draai de groene dopjes van de twee opvangbuisjes.

3

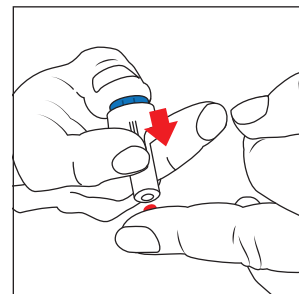


Ontsmet de vinger die je gaat prikken met het ontsmettingsdoekje. Masseer de vinger die je gaat prikken, zodat deze warm wordt. Leg je vinger zijwaarts op een harde, vlakke ondergrond. Duw de vingerprikker tegen de zijkant van de vinger en druk de knop stevig in.

4

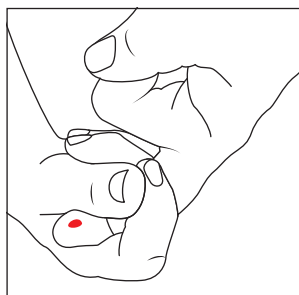


Stuw met duim en vinger tot er een druppel bloed verschijnt. Doe dit steeds opnieuw tot er voldoende bloed is (zie ook stap 5).

5

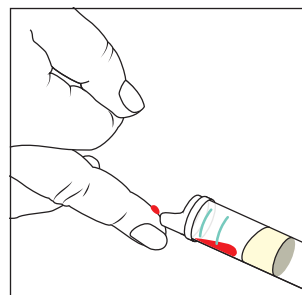


Houd je vinger omlaag en vang de druppels bloed op in de opvangbuisjes. Vul **beide** buisjes **tot de sluitrand** (ca. 700 microliter per buisje). Kun je geen bloed meer uit je vinger krijgen, prik dan een andere vinger en herhaal de stappen.

6

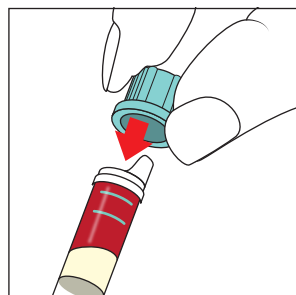

Sluit de opvangbuisjes met de groene dopjes. Maak de geprikte vinger schoon en plak de pleister erop.


7

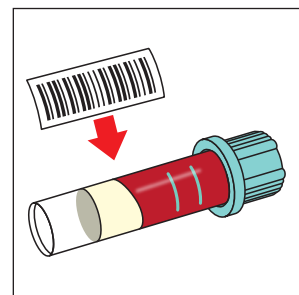

Plak op elk buisje een sticker met barcode.


VERZENDING

Leg het absorberend materiaal in de blister.

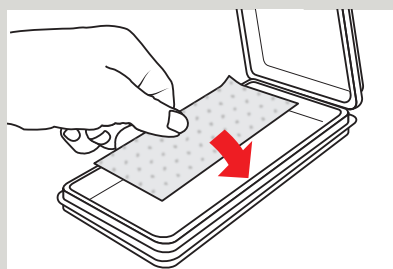

Leg de buisjes los op het absorberend materiaal in de blister.

Gebruik geen plakband of elastiek.

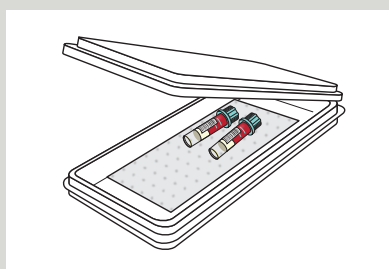

Stop de blister in de safetybag en plak deze dicht.

Knip het bovenste gedeelte van het aanvraagformulier en steek dit in het voorste vakje van de safetybag.

Schuif de safetybag met het aanvraagformulier in het kartonnen doosje en doe dit op de post.

